

PURE OFFICE 35% - tekst z polskiej ulotki

1 PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Żel do wybielania zębów jest środkiem do wybielania zębów zdewitalizowanych lub przebarwionych w wyniku chorób, urazów, leków lub jatrogennie.

2 OPIS PRODUKTU I UŻYTKOWNICY

2.1 Opis produktu

PURE OFFICE jest stosowany przez stomatologów do wybielania pojedynczych lub kilku zębów, w tym zębów leczonych endodontycznie. PURE OFFICE zawiera żel wybielający i aktywator w samomieszającej podwójnej strzykawce 4:1 (nabój). Zawartość nadtlenu wodoru w gotowym żelu wynosi 35%.

2.2 Grupa docelowa pacjentów

Do stosowania u wszystkich pacjentów wymagających wybielenia zębów zdewitalizowanych lub przebarwionych w wyniku chorób, urazów, jatrogennie lub pod wpływem leków.

2.3 Użytkownik

Żel PURE OFFICE jest stosowany przez stomatologa w gabinecie.

3 SKŁAD

Woda, nadtlenek wodoru, azotan potasu, fluorek sodu, wodorotlenek sodu, pochodne glikolu, zagęszczacz, barwnik.

4 WSKAZANIA

- Wybielanie przebarwionych, zdewitalizowanych zębów
- Wybielanie zębów przebarwionych w wyniku choroby, urazu lub jatrogennie jako alternatywa dla koron lub licówek
- Leczenie przebarwień zębów spowodowanych lekami (np. tetracykliną)

5 PRZECIWWSKAZANIA

- Odsłonięta zębina
- Uszkodzone krawędzie wypełnienia
- Pacjenci z nadwrażliwością
- Alergia lub nietolerancja na składniki
- Ciąża i karmienie piersią (z powodu braku danych empirycznych)

U niektórych pacjentów może wystąpić lekkie uwrażliwienie zębów podczas leczenia lub krótko po nim, ale zazwyczaj ustępuje ono po krótkim czasie.

Jeśli podczas zabiegu odczuwany jest nadmierny ból, należy przerwać zabieg!

6 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ

Niebezpieczeństwo. Produkt zawiera nadtlenek wodoru w roztworze. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

7 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

8 INTERAKCJE Z INNYMI ŚRODKAMI

Podczas zastosowania stomatolog musi uwzględnić ogólnie znane reakcje krzyżowe lub interakcje wyrobu medycznego z innymi materiałami znajdującymi się już w jamie ustnej pacjenta.

9 ZASTOSOWANIE

9.1 Przygotowanie

Określić odcień zęba poprzez porównanie z kolornikiem Vita® Shade Guide. W celu oceny należy posortować kolornik Vita® Shade Guide w następujący sposób:

Wartości posortowane według odcieni: A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Posortowane według jasności: B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D3 A3 D4 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4

B2 do B1 = wzrost wartości o 2, A3 do A2 = wzrost wartości o 4

Oczyszczyć zęby pacjenta strumieniem powietrza lub pastą czyszczącą. Założyć retraktor do policzków/warg itp. i zapewnić ochronę dziąseł. Nie znieczulać pacjenta.

9.2 Zastosowanie w przypadku przebarwionych zębów

Najpierw należy zdjąć klips mocujący, a następnie nasadkę zamykającą, kierując od pacjenta i od siebie. Nasadkę zamykającą zastąpić kaniulą mieszającą. Teraz wyciskać żel ze strzykawki tak długo, aż z igły zacznie wychodzić jednolicie zabarwiona masa o konsystencji żelu. Wyrzucić początkową, niejednorodną masę. Dłuższe przechowywanie w wyższych temperaturach może spowodować powstanie pęcherzyków w żelu. Może to również prowadzić do niejednorodnych, bardziej płynnych mieszanin, zwłaszcza w ostatniej ćwiartce podwójnej strzykawki. W takim przypadku nie należy stosować takiego materiału!

Żel należy nakładać na powierzchnie wargowe zębów, które mają być wybielone, na grubość około 1-2 mm. Końcówka kaniuli mieszającej dobrze nadaje się do równomiernego rozprowadzania. W celu wzmocnienia efektu można zastosować dostępną w handlu lampę plazmową lub laser. W takim przypadku należy założyć okulary ochronne na oczy pacjentowi i lekarzowi. Należy przestrzegać informacji podanych przez producenta. Należy bezwzględnie unikać przegrzania!

Po ok. 10 minutach czasu ekspozycji odessać żel i wytrzeć pozostałości. Jeśli efekt wybielenia nie jest wystarczający, procedurę można powtórzyć jeszcze dwukrotnie, aż do uzyskania pożądanego efektu. Najpierw należy się upewnić, że ochrona dziąseł jest nadal wystarczająca. Następnie ponownie określić kolor zębów.

Po ostatnim etapie wybielenia należy najpierw odessać żel, wytrzeć go, a następnie dokładnie spłukać wodą. Teraz należy wysuszyć powierzchnie zębów i wypolerować ją pastą do polerowania. Następnie należy zastosować w ramach leczenia uzupełniającego krem po wybieleniu lub roztwór lub żel z fluorem. Jest to również odpowiednie do leczenia bólu w przypadku występowania uwrażliwienia.

Jeśli materiał wystarczy jeszcze na kolejny zabieg wybielający, należy zdjąć kaniulę mieszającą i z powrotem założyć niebieską nasadkę. Materiał przechowywać w lodówce. Przy ponownym użyciu należy użyć nowej kaniuli mieszającej.

Po zabiegu pacjent nie powinien jeść, pić ani palić przez godzinę. Przez kilka następnych dni należy unikać substancji silnie barwiących (np. czerwone wino, kawa) i kwaśnych pokarmów.

Wskazówka: Ewentualne wypełnienia kompozytowe i materiały do uzupełnień z ceramiki lub metalu nie są wybielane. Wypełnienia należy zatem odnowić po upływie 2 tygodni od zabiegu.

9.3 Zastosowanie w przypadku zębów zdewitalizowanych/leczonych endodontycznie

Żel należy dodatkowo wprowadzić przez dostęp od strony języka. Najpierw należy sprawdzić wysokość grzbietu wyrostka zębodołowego. Następnie należy całkowicie usunąć materiał wypełniający z komory miazgi. Teraz należy nałożyć na dno komory miazgi wypełnienie glassjonomerowe o grubości 1-2 mm na poziomie grzbietu wyrostka zębodołowego lub koronowo do niego. Nałożyć ochronę dziąsła na stronę wargową i językową zęba.

Żel wybielający należy teraz nałożyć na powierzchnię wargową w sposób opisany w punkcie „Zastosowanie w przypadku przebarwionych zębów” oraz na otwór dostępowy i pozostawić na 10 minut. Następnie ostrożnie odessać żel i lekko spłukać wodą. Również w tym przypadku procedurę można powtórzyć dwukrotnie, jeśli nie uzyska się od razu pożądanego efektu wybielenia.

Po zakończeniu odessać żel i dokładnie przepłukać wodą. Ostrożnie usunąć ochronę dziąseł. Następnie zamknąć dostęp tymczasowym materiałem wypełniającym, który nie zawiera eugenolu. Przed wykonaniem ostatecznego uzupełnienia należy odczekać dwa tygodnie.

10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW/CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Niewystarczający efekt wybielania:

Powtórzyć procedurę wybielania (w razie potrzeby kilka razy).

Ból u pacjenta:

Kontakt żelu z odsłoniętą zębiną lub nieszczelnym wypełnieniem (należy przykryć przed zabiegiem).

Szczególnie wrażliwy pacjent (w zależności od indywidualnej struktury zęba).